


**Popis výrobku**

Náhradní matrace PENTAFLEX® se vyznačuje vysokou odolností polyuretanovým jádrem s 5 anatomickými zónami pro redistribuci tlaku, jež je otočné ve dvou směrech a je chráněno vozechodným, paropropustným potahem s obousměrným napínáním.

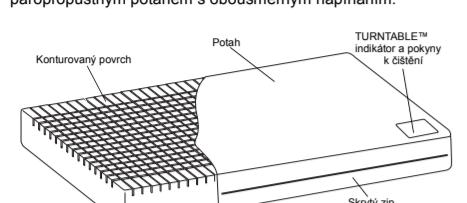

Při použití lůžka s vestavěnou funkcí prodloužení je k dispozici pěnový hřávací systém PENTAFLEX, více podrobnosti naleznete na stránkách poškození, znečištění či skvrny.

**Klinické použití****Indikace k použití**

Matrace PENTAFLEX 150 je indikována pro uživatele do hmotnosti 150 kg (330 lb/24 st). Matrace PENTAFLEX 250 je indikována pro uživatele do hmotnosti 250 kg (550 lb/3 st). Je vhodná pro celou řadu klientů, včetně osob postižených povrchovými vředly (v kombinaci s individuálním plánem péče).

**E** Uvedené informace jsou pouze orientační a neměly by nahrazovat klinické zkušenosti či úsudek. V případě, že nedojde k zlepšení klientova stavu, je doporučeno konzultovat se specialistou.

**VAROVÁNÍ**

Potah tohoto výrobku je paropropustný, není však prodyšný, proto může představovat nebezpečí utušení. Poskytujete péče odpovídá za to, aby uživatel uměl používat zařízení bezpečně.

**Návod k použití**

1. Odstraněte všechny obaly.  
2. Náhradní matraci PENTAFLEX položte na rám lůžka a ujistěte se, že na něm nejsou žádné ostré hrany, které by mohly probit potah.

**NEPOUŽÍVÁT MATERACI BEZ POTAHU**  
Slouží jako ochranná bariera a pomáhá tak prodloužit životnost výrobku.

3. Zkontrolujte, zda indikátor TURNTABLE™ v nožní části matrace zobrazuje správný měsíc. Pokud ne, otocte matraci tak, aby správný měsíc byl v nožní části. Měsíce jsou zobrazeny následovně:


1/12 = leden 2/12 = únor atd.  
4. Indikátor TURNTABLE používajte jako pomocnou pro otáčení a převracení matrace v měsíčních intervalech. Bude tak zajištěno rovnoramenné opořebení matrace a prodloužení její životnosti.

© i ™ jsou ochranné známky společnosti ArjoHuntleigh

Náš zásadou je neustále se zlepšovat, čímž si vyhrazujeme právo na změnu designu bez předchozího upozornění.

**Descrierea produsului**

Saltea modulară PENTAFLEX® are 2 fețe care pot fi utilizate pe rând, un număr de poliuretan de mare rezistență cu 5 zone anatomici de redistribuire a presiunii, fiind protejată de o huse impermeabilă la apă, permeabilă la vapor, realizată din material elastic în 2 direcții.

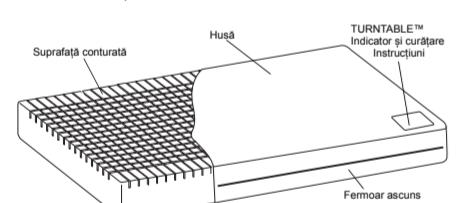

O pene din spumă PENTAFLEX este disponibile pentru a fi utilizată cu extensile de pat integrate; pentru detaliu suplimentare, consultați broșura utilizatorului 609903.

**Utilizări clinice**

Înstrucțiuni de utilizare  
Saltea modulară PENTAFLEX 150 este indicată pentru utilizatori cu greutatea maximă de 150 kg (330 lbs/24 stona). Saltea PENTAFLEX 250 este indicată pentru utilizatori cu greutatea maximă de 250 kg (550 lbs/3 stona). Este adecvată pentru o gamă variată de pacienți, inclusiv cei cu ulcere superfciale (în asociere cu un plan de îngrijire profesională).

Utilizarea sunt doar sugestii și nu trebuie să înlocuască experiența sau evaluarea clinică. În cazul în care starea pacientului nu se îmbunătășește, trebuie consultat un specialist.

**AVERTISMENT**

Husa acestui produs este permeabilă la vapor, dar nu este permeabilă la aer și se poate prezenta risc de surfață. Personalul medical are responsabilitatea de a se asigura că utilizatorul poate utiliza acest produs în siguranță.

**Instrucțiuni de utilizare**

1. Îndepărtați totale ambalajele.  
2. Poziționați saltea PENTAFLEX pe cadru patului, asigurându-vă că nu există margini ascuțite care ar putea rupe husa.

**NU UTILIZAȚI SALTEAU FĂRĂ HUSA**  
Aceasta oferă o barieră protectoare, care ajută la prelungirea duratăi de viață a produsului.

3. Asigurați-vă că indicatorul TURNTABLE™ din partea inferioară a saltelei are luna corectă. Dacă nu este afișată luna corectă, rotiți salteaua, astfel încât luna corectă să apară în partea de la picioare. Luni sunt indicate după cum urmează:

1/12 = ianuarie 2/12 = februarie etc.

4. Utilizați indicatorul TURNTABLE pentru a vă ghida la rotația luncă și la întoarcerea saltelei. Aceasta ajută la uniformizarea uzurii saltelei și la prelungirea duratei de viață a produsului.

© și ™ sunt mărci comerciale ale ArjoHuntleigh

Pentru că politica noastră presupune o optimizare continuă, ne rezervăm dreptul de a modifica modelele fără preaviz.

409900INT1\_01

409900INT1\_01